

Curativo de ferida oral **Curatick™**

> **Curatick** é um adesivo para feridas orais

• Uso pretendido

Este dispositivo é utilizado para proteger feridas orais através da formação de uma barreira sobre a ferida.

• Indicação

É indicado para uso com úlceras e pequenas feridas da mucosa oral incluindo feridas e lesões causadas por auto-mordedura, aparelho e dentaduras mal ajustadas, etc.

• Características e benefícios (Característica de desempenho)

- Proteger feridas orais tais como feridas de aftas e pequenas feridas da mucosa oral causada por aparelho, próteses mal ajustadas, auto-mordedura, etc
- Autocolante com saliva e água
- Dura até 4 horas
- Reduzir irritação das feridas na boca
- Alívio da dor
- Previne infecções secundárias e lesões
- Protege fatores de crescimento curativos
- O sabor menta reduz a halitose



• Como usar

Preparação

1. Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do produto, utilizar somente se a embalagem estiver intacta.
2. Leia atentamente as instruções antes de utilizar. (A presença de bolha no produto é proveniente do processo de fabricação e não indica que ele está estragado)

Instruções

1. Abrir a embalagem cuidadosamente na borda serrilhada da embalagem lacrada, retirando-o somente na hora do uso. Não use instrumentos afiados como tesouras ou pontiagudos (não use unhas ou dentes).
2. Limpar a área afetada antes da utilização e limpar se houver muita saliva.
3. Remova o liner do curativo, expondo a superfície adesiva.
4. Aplicar a camada adesiva sobre a ferida.
5. Pressionar ligeiramente o curativo durante 5 a 10 segundos até ocorrer a aderência.

*Este produto pode ser endurecido de acordo com o armazenamento e método de gestão. Embora seja capaz de fixar mais de 2-4 horas em média, o método de fixação e o ambiente podem resultar em tempos de aderência mais longos ou mais curtos.

REF	MODELO	⚠	ATENÇÃO
LOT	NÚMERO DO LOTE	📖	CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
🏭	FABRICANTE	🚫	NÃO UTILIZE SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA
📅	DATA DE FABRICAÇÃO	🌡	TEMPERATURA LIMITE
🕒	DATA DE VALIDADE	☀	MANTENHA LONGE DA LUZ SOLAR
🔄	NÃO REUTILIZE	CE	MARCA DA COMUNIDADE EUROPEIA
EC/REP	REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA	GMP	CERTIFICAÇÃO GMP

REF CR12,CR23,CR53



ISO
13485

• Contra-indicações

1. Não utilizar produtos que tenham expirado, danificados ou contaminados devido a infecção ou infecção cruzada
2. Não utilizar se houver suspeita de infecção e se ocorrer uma infecção. (uma ferida que parece ser anormal, tal como febre ou edema)
3. Não usar em feridas profundas com hemorragia excessiva.
4. Remover o produto antes de ir para a cama, como proteção contra a queda. pois poderá bloquear as vias aéreas.

• CUIDADOS

⚠ Este dispositivo médico é de uso único. Se reutilizado, o produto pode causar infecção, infecção cruzada e inflamação. Este produto deve ser descartado de acordo com a legislação sanitária vigente.

1. Leia atentamente as instruções antes de utilizar.
2. Se sofrer qualquer inchaço, reação alérgica, irritação do estômago ou quaisquer sinais de infecção, consulte o seu médico.
3. A ferida poderá soltar-se se o produto for removido à força. O lado de fixação cai automaticamente quando se dissolve completamente na boca.
4. Remover a camada de proteção que caiu da ferida.
5. Preste atenção ao ser utilizado para as crianças menores de 5 anos de idade, pois a superfície protetora pode cair e bloquear as vias aéreas.
6. O tempo de fixação pode ser reduzido quando estimulado pela língua ou comida.

Importante: qualquer incidente grave após o uso do produto deverá ser comunicado ao representante legal no Brasil - M2LIFE Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

• Perfil do paciente aplicável

- Pacientes que necessitam de uma proteção para feridas orais. Atenção quanto ao uso em crianças pequenas com menos de 5 anos de idade.
- Utilizador do dispositivo: adulto, pessoa que tem experiência relacionada com o fixação de curativos de feridas.

• Armazenamento

1. Este dispositivo deve ser armazenado na embalagem original fechada.
2. Armazenar em temperaturas entre 1°C – 35°C.
3. Evitar fogo, luz solar direta e ambientes com temperaturas elevadas.
4. Manter fora do alcance das crianças.

🏢 **Produzido por:** TBM Corporation. B-301, 313, cheomdangwangi-ro Buk-gu, Gwangju, korea 61008 - www.tbmkorea.com

Importado e distribuído por: M2LIFE Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

CNPJ: 30.820.069/0002-03. IE 260206458 - Rua Manoel Vieira Garção, nº 77, Térreo Sala 503. Centro, Itajaí - SC - SAC: sac@m2life.com.br - (45) 3065-0828

Responsável Técnico: Marcelo Galindo Lahoud - CRQ/SC N° 09203411

Autorização/MS n°: 8.19.119-3 - Registro Anvisa n°: 81911939002